



DR181 - Holterin kiinnityksen ohjeet

7 elektrodin sijoitus

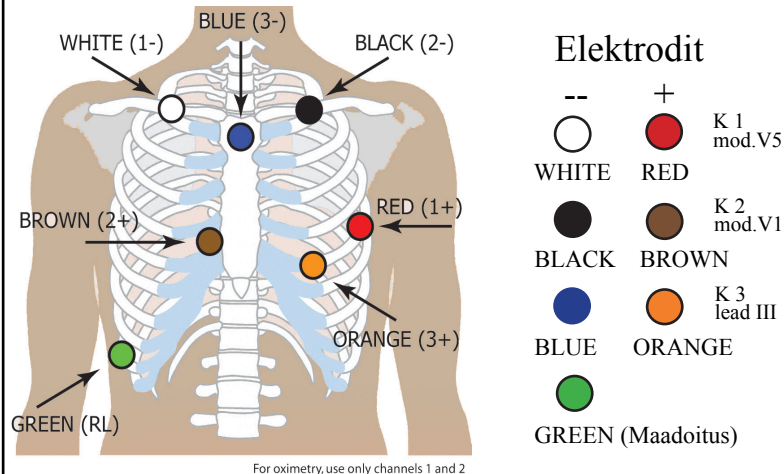


5 elektrodin sijoitus

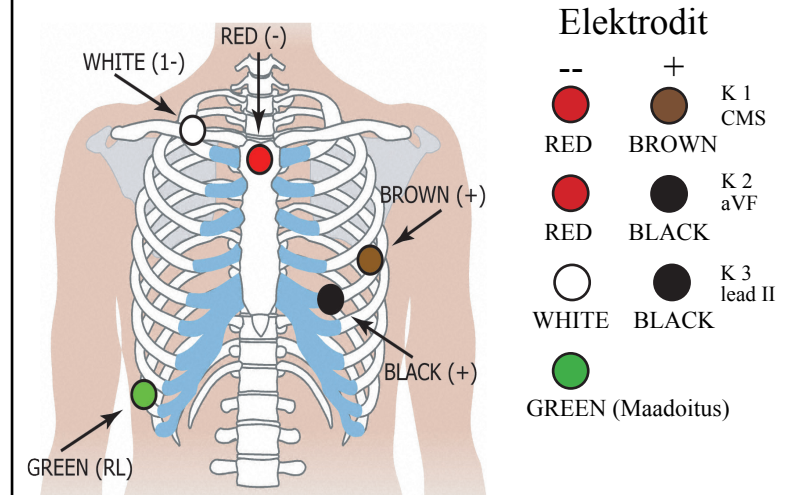


Potilaan valmistelu

- Valitse luun päällinen alue välttämällä lihasaluetta ja rintakudosta
- Puhdista elektrodien paikat huolellisesti alkoholilla ja poista ihokarvat partakoneella.
- Hankaa elektrodien paikkoja hankaustyynyllä tai sideharsolla. Anna paikkojen kuivua ennen elektrodien sijoittamista.
- Napsauta elektrodit tukevasti johtimiin.
- Kiinnitä elektrodit asianmukaisesti paikkoihin. Paina liimareunaa tiiviisti kiinnityksen saamiseksi.
- Vähennä kiristymistä kiertämällä johtimet silmukalle ja teippaamalla ne kiinni.

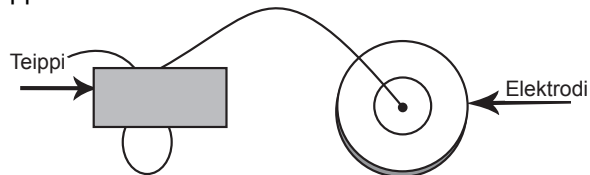

10 elektrodin sijoitus, 12-joht.

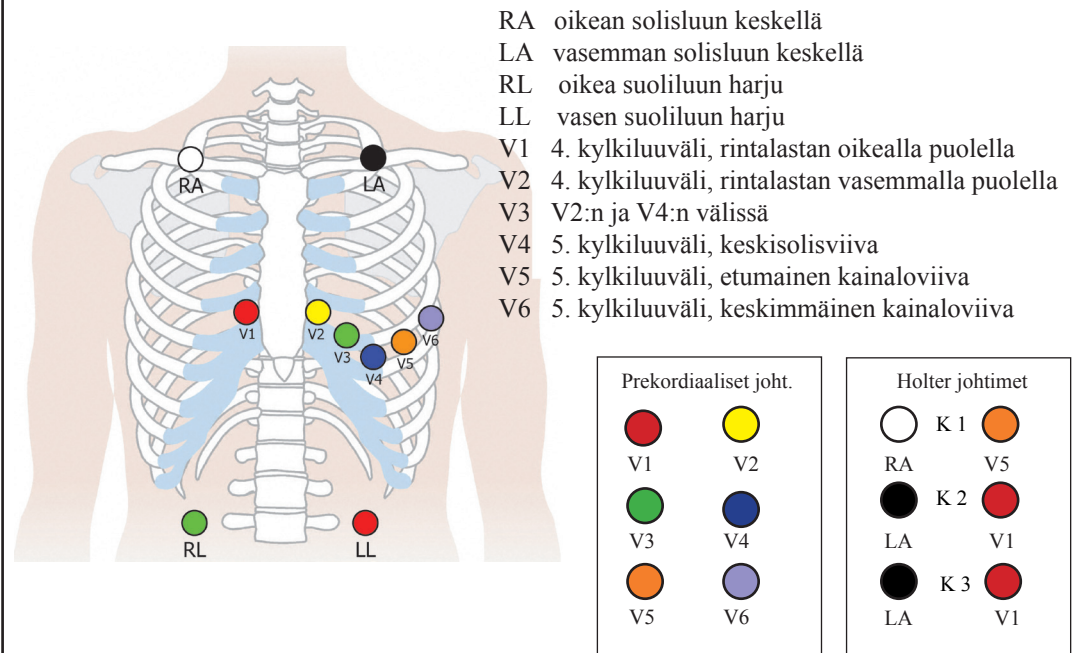

DR181 - Holterin pikaopas



ILMOITUKSET:

Heikko paristo tai vika – Vaihda kumpikin paristo ennen tallentimen käynnistämistä.

Tyhjennä SD-kortti? KYLLÄ/EI – Jos SD-korttia on käytetty aiemmalla potilaalla, sinun täytyy tyhjentää se nyt. Jos korttia ei tarvitse tyhjentää, koska siinä on EKG-tietoja, joita et halua menettää, ota kortti pois ja aseta sen tilalle toinen alustettu SD-kortti.

SD-kortti on täynnä – Rekisteröinti on keskeytetty, koska muisti on täynnä.

SD-kortin virheet – SD-kortit täytyy alustaa LX Holter -ohjelmistolla. SD-kortissa on lisäksi oltava flash.dat-tiedosto, jotta sille voidaan rekisteröidä. Katso SD-kortin virheitä ja alustamista koskevia tarkempia tietoja Holter LX:n käyttöoppaasta.

REKISTERÖINNIN ALOITTAMINEN:

1. Kiinnitä kaapeli tallentimeen ja kytke potilas sitten käänöpuolella kuvatulla tavalla.
2. Aseta alustettu SD-kortti ja kaksi AA-paristoa tallentimeen. Tyhjennä SD-kortin muisti kehoitettaessa. Näytössä näkyy päivämäärä, kellonaika, pariston teho, DR181, ohjelmiston versio ja NorthEast Monitoring. Jatka päävalikkoon painamalla Seur..
3. Sääda haluttaessa asetuksia painamalla näppäimistön painiketta. Saat Asetukset-valikossa näkyviin lisävaihtoehtoja painamalla Lisää.
4. Kun asetukset ovat oikein, siirry takaisin päävalikkoon painamalla Edell (Edellinen) -painiketta.
5. Vahvista tai anna potilastunnus painamalla Uusi potilas -näyttöä. Potilastunnus-kohtaan on annettava vähintään yksi merkki. Kun olet antanut potilastunnuksen, paina Seur.
6. Näet nyt kolmen kanavan johtimien laadun. Johtimien laadun eli impedanssin tulisi olla 4 tai 5 parhaiden tulosten saamiseksi. Sääda johtimia tarpeen mukaan.
7. Aloita rekisteröinti painamalla Rekist. (Jos valittuna on 12-joht., paina Seur., jotta näet kaikki neljä johtimen laadun näyttöä.)

REKISTERÖINNIN JÄLKEEN:

Poista kortti rekisteröinnin jälkeen vapauttamalla se painamalla sitä varovasti sisäänpäin. Älä koskaan vedä korttia suoraan ulos korttipaikasta, sillä se voi vahingoittaa tallenninta.

HUOMAA: Jos haluat rekisteröidä uuden potilaan ja edellisen potilaan rekisteröinnin päättymisestä on kulunut vähemmän kuin tunti, tallennin saattaa yrittää jatkaa rekisteröintiä. Voit keskeyttää 5 sekunnin laskennan painamalla viittä vasemmanpuoleista painiketta ylhäältä alkaen. Tyhjennä SD-kortti, minkä jälkeen voit rekisteröidä uuden potilaan.

YLEISASETUKSET:

Aika ja Päivä – Siirry Päivä- ja Aika-näytön välillä näytön oikeassa alaosassa.

Kieli – Valitse useista käytettävissä olevista kielistä

Näyttö – Valitse Normaali- ja Käänt.näytön välillä

Lukitse asetukset – Lukitsee kaikki tallentimen asetukset

Kontrasti - Säättää LCD-näytön kontrastia

Yleisasetukset:

Tarkkuus – Valitse joko Suuri tai Normaali tarkkuus

Merkitse päivä – Valitse, haluatko tehdä päiväkirjamerkintöjä EKG:hen kuusijaksoisella neliöaallolla

Rek.tyyppi – Valitse joko 3-kanav. tai Oksimetria. 12-joht. on valinnainen.

12-joht. asetukset

Väli – Kuinka usein väli tallennetaan. Numero tarkoittaa tallennusten välistä sekuntimäärää.

Pituus – Tallennetun 12-joht. tulosten pituus

Näytt.taaj. – Valitse näytteenottotaajuus väliltä 720 ja 1440 näytettä sekunnissa



MediMark Eruope, SARL
11 rue Emile Zola
BP 2332
F-38033 Grenoble CEDEX 2
France



0143